

Influenza A & B Strip Type

Influenza A & B Test

Influenza 검사의
Total Solution을 제공합니다.



FAST!

SIMPLE!

EXACT!



Influenza Strip

Influenza A&B Test는 면역크로마토그래피법을 이용하여 별도의 장비 없이 인플루엔자 Type A와 Type B를 구분하여 검사하는 Rapid Diagnostic Test입니다.

- 신속한 검사 (15분 이내)
- 쉬운 검사방법 (3단계)
- A, B 바이러스 동시 검사
- 여러 변종의 인플루엔자 바이러스 진단 가능 (H1N1, H3N2 등)
- 간섭 반응 및 교차 반응 테스트 완료



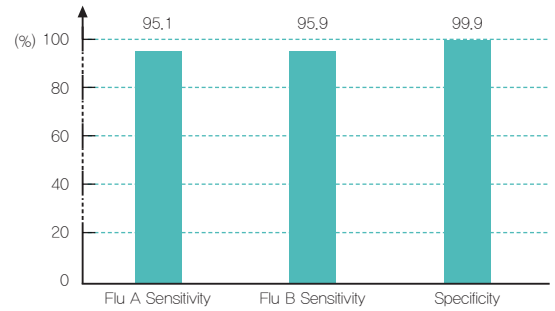



그림 1. 높은 민감도 및 특이도

Influenza Strip 검사 절차

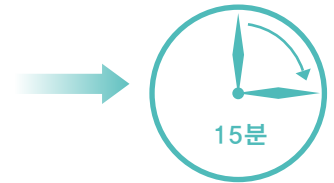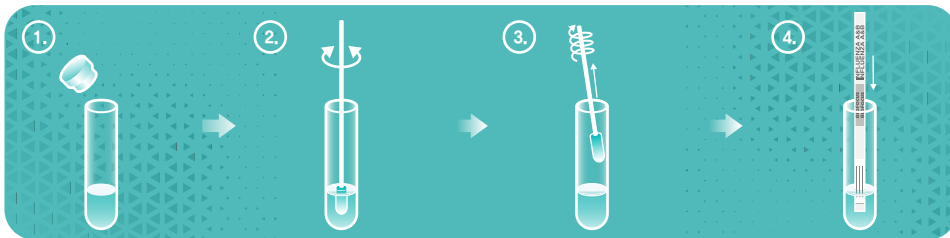

1. 검체 추출액 튜브의 뚜껑을 개봉합니다.
2. 스왑검체를 튜브에 넣어 3~5회 정도 돌려줍니다.
3. 추출된 스왑을 벽면을 따라 돌려서 짜주면서 빼냅니다.
4. 검사용 스트립을 테스트 튜브에 넣고 반응시킵니다.
5. 판독합니다.

Influenza Strip 결과 해석

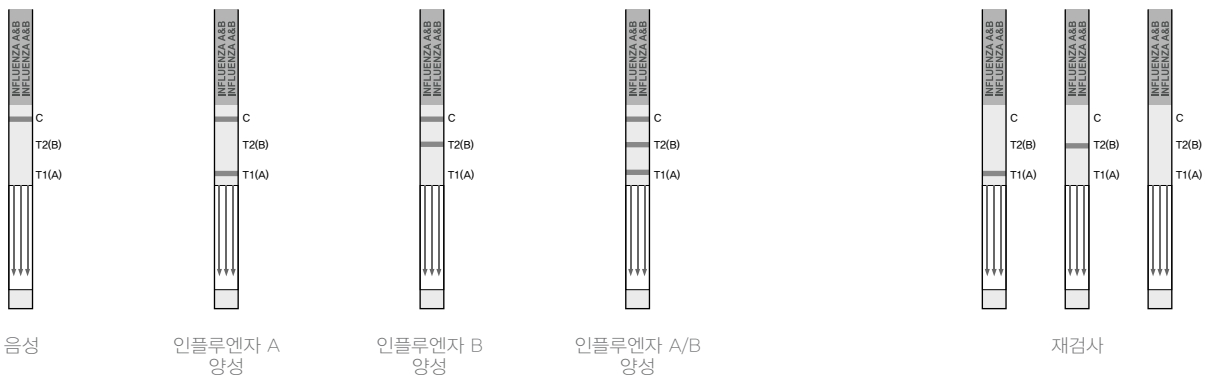

Influenza Strip 주문 정보

주문 번호	제품명	형태	포장 단위	검체 종류	사용기한
11321	BioTracer™ Influenza A&B Test	Strip	20T/Kit	코 및 인후 분비물	24개월